

VIRKON

YTDESINFEKTIONSMEDEL

Desinfektionsmedel med snabb effekt



Ett världspatenterat desinfektionsmedel som avdödar bakterier, virus och svamp. Virkon (Virus kontroll) har fått sitt namn från sin mycket väldokumenterade effekt mot alla virusfamiljer och används idag på nästan alla sjukhus. Virkon är en sammansatt produkt som vid aktivering med vatten bildar ett flertal desinfekterande ämnen, den viktigaste är underklorosyrlighet.

Virkon innehåller även en fettlösande tensid, vilket gör att det normalt inte behövs rengöring innan desinfektion. Virkon är trots sin väldokumenterade effekt inte hälsofarligt men bör användas med respekt precis som andra kemikalier.

Virkon är väl miljöanpassat för sitt ändamål. Ingående komponenter förekommer i mycket låg koncentration och bryts lätt ner.

Virkon är ett surt medel vilket gör att vissa metallsorter såsom koppar, mässing, järn och aluminium inte tål längre kontakttid än några minuter, i övrigt tål de allra flesta material VirKon bra.

Desinfektion av ytor:

Fukta och bearbeta ytan med en mopp eller torkduk, se till att ytan är ren. Låt ytan självtorka (10 min). Eftertorka vid behov med i vatten fuktad torkduk (Virkon efterlämnar ett fint damm som på blanka ytor behöver avtorkas).

För mer info se: www.viroderm.se

Fördelar

Säker, snabb och effektiv.
Enkel att blanda, vattenlöslig påse.
Liten vikt och volym vid transport.
Säker för användaren, skonsam mot miljön.

Nackdelar

Brukslösning endast hållbar i 5 dygn.

Art nr 7507

Förpackning 1kg

Blandningsinstruktion

Tillsätt 10 g pulver till 1 liter ljummet vatten. Blanda noggrant tills pulvret har lösts upp och lösningen antagit en rosa färg. Brukslösningen är klar att använda då den är rosafärgad.