

VIRKON

YTDESINFEKTIONSMEDEL

Desinfektionsmedel med snabb effekt i vattenlöslig påse



Virkon är ett surt medel vilket gör att vissa metallsorter såsom koppar, mässing, järn och aluminium inte tål längre kontakttid än några minuter, i övrigt tål de allra flesta material VirKon bra.

Desinfektion av ytor:

Fukta och bearbeta ytan med en mopp eller torkduk, se till att ytan är ren.

Låt ytan självtorka (10 min).

Eftertorka vid behov med i vatten fuktad torkduk (Virkon efterlämnar ett fint damm som på blanka ytor behöver avtorkas).

Ett världspatenterat desinfektionsmedel som avdödar bakterier, virus och svamp. Virkon (Virus kontroll) har fått sitt namn från sin mycket väldokumenterade effekt mot alla virusfamiljer och används idag på nästan alla sjukhus.

Virkon är en sammansatt produkt som vid aktivering med vatten bildar ett flertal desinfekterande ämnen, den viktigaste är underklororsyrlighet.

Virkon innehåller även en fettlösande tensid, vilket gör att det normalt inte behövs rengöring innan desinfektion. Virkon är trots sin väldokumenterade effekt inte hälsofarligt men bör användas med respekt precis som andra kemikalier.

Virkon är väl miljöanpassat för sitt ändamål. Ingående komponenter förekommer i mycket låg koncentration och bryts lätt ner.

För mer info se: www.viroderm.se

Fördelar

Säker, snabb och effektiv.
Enkel att blanda, vattenlöslig påse.
Ingen pulverkontakt.
Liten vikt och volym vid transport (200 liter väger ca 2kg).
Säker för användaren, skonsam mot miljön.

Nackdelar

Brukslösning endast hållbar i 5 dygn.
Säljs endast i 10g påsar för 1 liter brukslösning.

Art nr 7511 Påse

Förpackning 40x(5x10g)

Art.nr: 7011019 flaska

Förpackning 12x1L

Blandningsinstruktion

Virkon startflaska innehåller en påse med Virkon. Fyll på med 1 liter ljummet vatten, (ca 25°C), och vänta i ca 3-5 minuter. Brukslösningen är klar att använda då den är rosafärgad.