

Lectro Derm Värmedyna för riskfri hantering på patient.

Värmedynan avger 54°C när den aktiveras. Värmen upplevs olika på olika hudpartier av patienten så var därför alltid lyhörd för patientens upplevelse. Vi rekommenderar att patienten i möjligaste mån själv håller i dynan på av personalen avsedd plats på kroppen. Pappersservett eller tygstycke kan läggas mellan hud och dyna som skydd. Vi rekommenderar vår skyddspåse vid användning på barn samt på övriga patienter med känslig hud.

1. Provtagningsdyna och laddare får endast användas av utbildad personal*
2. Använd aldrig återladdad dyna innan den svalnat till rumstemperatur.
3. Informera alltid patienten att säga till om dynan känns för varm.
4. Om dynan används på patient som inte kan förmedla hur värmen upplevs så SKALL vår skyddspåse användas. Var extra försiktig vid användning på patient med dålig blodcirkulation. Temperaturen med skyddspåse når som högst 42°C efter ca tretton minuter och sjunker sedan långsamt.
5. Använd inte provtagningsdynan direkt på sårig hud.
6. Om dynan går sönder och innehållet hamnar på huden skall huden sköljas med ljummet vatten. Innehållet är ej frätande eller giftigt.
7. OBS! Dynan skall desinficeras mellan varje patient. Detta sker normalt via ångkokning men man kan även göra detta genom avtorkning i ytdesinfektionssprit/Virkon om dynan används till mer än en patient innan ångkokning/återladdning.

***Med utbildning avses att produktinformationen är läst och förstådd.**

2013-09-10