

Lectro Derm Värmedyna för riskfri hantering på patient.

Aktivera dynan genom att fänga upp metallknappen längst ner i ett hörn och tryck sedan in knappen så att den konvexa sidan blir konkav. Om dynan inte är använd på länge kan man behöva trycka ett par gånger. När dynan startar blir den hård och 54°C varm, massera ett par gånger så blir den mjuk. Vid användning på personer som inte kan bedöma värmen SKALL vår skyddspåse användas så att temperaturen dämpas. Vi rekommenderar att patienten i möjligaste mån själv värmer medan du som sköter provtagningen tar fram det material som behövs. På detta sätt sparar du tid samtidigt som patienten själv kan reglera hur mycket värme som känns bra. Om patienten är orolig är det mycket lämpligt att patienten kramar dynan i andra handen medan provtagningen sker. Värme är nämligen lugnande och gör att patienten slappnar av.

1. Provtagningsdyna och laddare får endast användas av utbildad personal*
2. Använd aldrig återladdad dyna innan den svalnat till rumstemperatur.
3. Informera alltid patienten att säga till om dynan känns för varm.
4. Om dynan används på patient som inte kan förmedla hur värmen upplevs så SKALL vår skyddspåse användas. Var extra försiktig vid användning på patient med dålig blodcirkulation. Temperaturen med skyddspåse når som högst 46°C efter ca tretton minuter och sjunker sedan långsamt.
5. Använd inte provtagningsdynam direkt på sårig hud.
6. Om dynan går sönder och innehållet hamnar på huden skall huden sköljas med ljummet vatten. Innehållet är ej frätande eller giftigt.
7. OBS! Dynan skall desinficeras mellan varje patient. Detta sker normalt via ångkokning men man kan även göra detta genom avtorkning i ytdesinfektionssprit/Virkon om dynan används till mer än en patient innan ångkokning/återladdning.

***Med utbildning avses att produktinformationen är läst och förstådd.**

OBS! Läs manualen innan användning. Risk för brännskada finns vid felaktig hantering.

2024-07-02