

TEKNISK BULLETTIN

INFORMATION FRÅN VIRKON MEDICAL SCANDINAVIA AB
2010-02-01

Nr 31
Sid 1/1

VirKon OCH DESINFEKTION AV AVTRYCKSMATERIAL

Addendum till Teknisk Bulletin Nr 11 "VirKon i tandläkarpraktiken"

Desinfektion av avtryck och tandtekniska arbeten.

I Teknisk Bulletin Nr 11 "VirKon i tandläkarpraktiken" sägs följande om desinfektion av avtryck. "Tandläkaren har en skyldighet att tillse att alla avtryck och tandtekniska arbeten sköljs av och desinfekteras innan de sänds till tandtekniskt laboratorium samt desinfekteras då de återkommer från laboratoriet. Avtrycksmaterial påverkas olika av kemiska desinfektionsmedel. VirKon lämpar sig för rengöring och desinfektion av i stort sett alla vanligen förekommande avtrycksmaterial. Vissa material påverkas negativt av längre tids kontakt med

olika vätskor. Detta gäller speciellt hydrokolloidmaterial."

En tillverkare av hydrokolloidmaterial, Van R Dental, har godkänt VirKon för desinfektion av hydrokolloidmaterial och rekommenderar följande tillvägagångssätt:

Desinfektera och rengör hydrokolloidavtrycket genom att

- a) nedsänka avtrycket i en 1%-ig VirKon-lösning under en tid av 1 minut, varefter det sköljs i vatten och får torka, eller
- b) spraya avtrycket med 1%-ig VirKon-lösning så att alla ytor fuktas och låt det torka.