

# TEKNISK BULLETTIN

INFORMATION FRÅN VIRKON MEDICAL SCANDINAVIA AB

Nr 35

2010-02-01

Sid 1/1

## VirKon I TANDLÄKARPRAKTIKEN

### DESINFEKTION AV TANDLÄKARUNIT

Tandläkaruniten ska desinfekteras mellan varje patient. Med hänsyn till den begränsade tid som står till förfogande bör man använda ett desinfektionsmedel som inte endast är effektivt utan också snabbt verkande.

Desinfektionen är lämplig att utföra så snart patienten lämnat tandläkarstolen och görs lämpligen på följande sätt:

- Använd 1 % lösning av Virkon
- Torka av ytorna med en torkduk, mopp el dyl, som infuktats i Virkonlösningen. Tillse att ytorna blir fuktade.
- Låt lufttorka ca 1 min., under vilken

tid andra sysslor naturligtvis kan utföras.

- Därefter kan ny patient tas emot.

OBS! Virkon-lösningen kan under vissa omständigheter efterlämna ett fint dammlager på de desinfekterade ytorna. Det rör sig om intorkade, inaktiva saltrester. Om så skulle vara fallet rekommenderar vi att ytorna någon gång då och då eftertorkas med en trasa, som fuktats i vatten.

Ovanstående rutin gäller desinfektion av kontaminerade ytor, d v s ytor utan synliga föroreningar. För instruktion om desinfektion av synligt förorenade ytor hänvisas till Teknisk Bulletin Nr 11.

**VirKon** kombinerar *snabb effekt* med *brett verkningspektrum* och *hög säkerhet* för användaren. Till detta kommer en *rengörande effekt* förutom desinfektion och *rimliga miljöegenskaper*.