

TEKNISK BULLETTIN

INFORMATION FRÅN VIRKON MEDICAL SCANDINAVIA AB

Nr 36

2010-02-01

Sid 1/1

VirKon I TANDLÄKARPRAKTIKEN

DESINFEKTION AV AVTRYCK OCH TANDTEKNISKA ARBETEN

Tandläkaren har enl Socialstyrelsen¹ skyldighet att tillse att alla avtryck och tandtekniska arbeten sköljs av och desinfekteras innan de sänds till tandtekniskt laboratorium samt att de desinfekteras då de återkommer från laboratoriet. Samma syn kommer till uttryck i olika internationella publikationer.²
³

VirKon lämpar sig utmärkt för rengöring och desinfektion av alla vanligen förekommande avtrycksmaterial inkl hydrokolloidmaterial.

Generell instruktion:

- Spraya föremålet med 1% Virkon-lösning
alt lägg ner det i en 1% Virkon-lösning.
- Låt inverka 10 minuter.
- Skölj av föremålet med kranvatten.

Instruktion för hydrokolloid-avtryck

- Nedsänk avtrycket i en 1% Virkon-lösning
- Låt inverka i 1 min.
- Skölj avtrycket med kranvatten

Alternativt

- Spraya avtrycket med 1% Virkon-lösning och
tillse att alla ytor blir fuktade
- Skölj avtrycket med kranvatten.

VirKon kombinerar *snabb effekt* med *brett verkningspektrum*
och *hög säkerhet* för användaren. Till detta kommer en *rengörande*
effekt förutom desinfektion och *rimliga miljöegenskaper*.

¹ Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 6/95 - Hygienrutiner inom tandvården

² F.D.I. Guidelines. Recommendations for hygiene in dental practice, including treatment for the infectious patient: Technical Report No. 10. Int. Dent. J., 37:142-45, 1987

³ A.D.A. Guidelines. Guidelines for infection control in the dental office and the commercial laboratory. J.Am.Dent.Assoc., 110:969-72, 1985