

VirKon I TANDLÄKARPRAKTIKEN

DESINFEKTION AV RÖNTGENFILM

Röntgenfilm är materialmässigt väl kompatibel med Virkon. Desinfektion av röntgenfilm företas genom att den exponerade filmen bringas i kontakt med 1 % Virkon-lösning. Förslagsvis iordningställs någon typ av skål, som fylld med Virkon-lösning förvaras i anslutning till den plats där filmen framkallas. Kontakttiden behöver inte vara längre än ett par minuter, men nedan föreslagen rutin ger en längre kontaktid.

Förslag till desinfektionsrutin:

- Röntga patientens munhåla
- Lägg röntgenbilderna i en skål med Virkon-lösning
- Undersök patientens tänder

- Ta upp bilderna (efter 5-10 min) och framkalla dem på vanligt sätt
- Informera patienten

Förslag till alternativ desinfektionsrutin:

- Röntga patientens munhåla
- Torka av röntgenrör, röntgenfilm och skyddskrage med torkduk, som fuktats i Virkon-lösning
- Framkalla röntgenfilmen på vanligt sätt
- Undersök patientens tänder
- Informera patienten

VirKon kombinerar *snabb effekt* med *brett verkningspektrum* och *hög säkerhet* för användaren. Till detta kommer en *rengörande effekt* förutom desinfektion och *rimliga miljöegenskaper*.